



**Lunettes à conduction
osseuse numériques
F228 D - F229 D**

Guide d'utilisation

Table des matières


Votre aide auditive F228 D.....	4
Votre aide auditive F229 D.....	5
La pile	6
Marche/Arrêt	7
Contrôle de volume	7
Entretien journalier	8
Précautions d'usage	8
Service après-vente	9
Informations règlementaires	10
En cas de problèmes	10
Garantie	11

Les lunettes à conduction osseuse numériques STARKEY sont des appareils électroniques de haute technologie construites selon les plus récentes connaissances audiolologiques.

La prévention et l'entretien régulier de vos lunettes leur assureront une durée de vie maximum si vous suivez les recommandations contenues dans ce guide d'utilisation.

Vos lunettes ont été réglées selon votre perte auditive par un audioprothésiste, aucun autre utilisateur ne doit les porter.
Votre audioprothésiste vous expliquera comment les utiliser.

Votre aide auditive F228 D

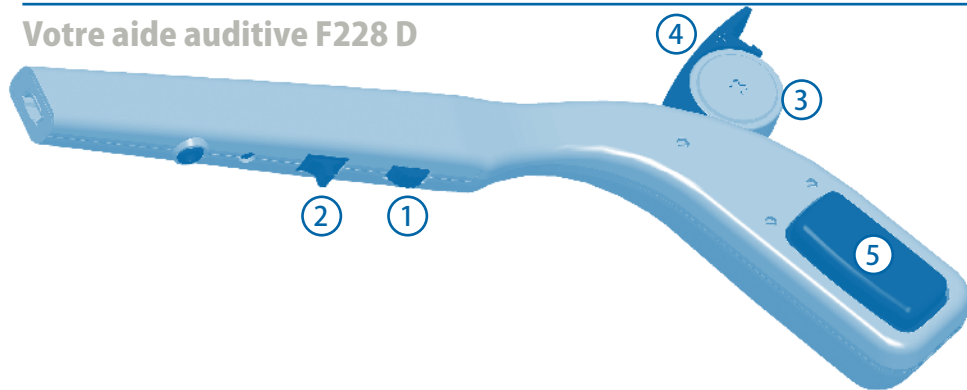


- ① Contrôle de volume
- ② Interrupteur O-T-M
- ③ Pile
- ④ Tiroir pile
- ⑤ Vibreur

Caractéristiques techniques selon Publication IEC n° 118-9

Niveau max. de sensibilité acoustique - mécanique / dB	48
Niveau max. de force de sortie / dB OFL	117
Consommation en mA	1.2 à 1.35V
Type de pile	675
Durée moyenne de la pile / heure zinc/air 675(capacité 570 mAh)	475

Votre aide auditive F229 D

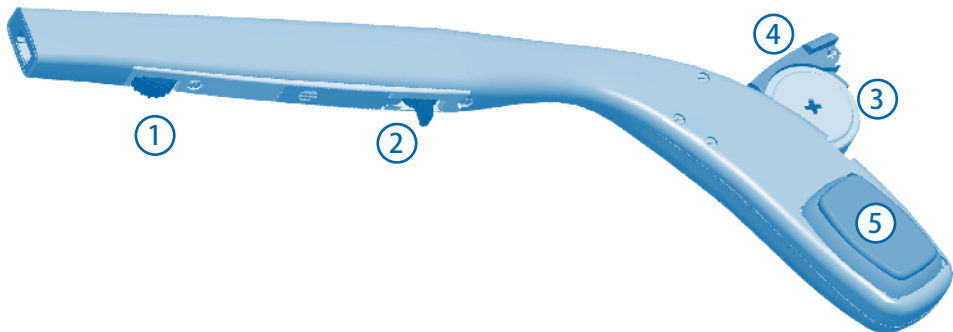

- ① Contrôle de volume
- ② Interrupteur O-T-M
- ③ Pile
- ④ Tiroir pile
- ⑤ Vibreur

Caractéristiques techniques selon Publication IEC n° 118-9

Niveau max. de sensibilité acoustique - mécanique / dB	50
Niveau max. de force de sortie / dB OFL	110
Consommation en mA	1.2 à 1.35V
Type de pile	675
Durée moyenne de la pile / heure zinc/air 675 (capacité 610 mAh)	510

La pile

Ouvrez le tiroir pile en glissant l'ongle sous le rebord et tirez doucement vers le bas.

Insertion : Placez le côté + de la pile vers l'intérieur de la branche. Fermez doucement et complètement le tiroir pile. NE JAMAIS FORCER. Si le tiroir pile ne ferme pas complètement, vérifiez si la pile est insérée dans le bon sens.

Extraction : Retirez la pile en poussant vers le haut.

Type de pile :

Pile de haute qualité 675 ou équivalente.

Si vous n'utilisez pas votre aide auditive pendant un long moment, enlevez la pile du tiroir pile.

ATTENTION : Les piles sont de petite taille.

Afin de ne pas risquer de les confondre avec vos médicaments, rangez-les dans un endroit différent.

Assurez-vous que les piles ne soient pas à la portée des enfants, des animaux domestiques ou des handicapés mentaux.

Ne jamais mettre de pile dans la bouche afin de ne pas risquer de l'avaler.

Ne jamais lécher une pile car cela peut provoquer de sérieuses brûlures et une intoxication.

Consultez immédiatement un médecin en cas de :

- brûlures causées par le léchage d'une pile,
- en cas de pile avalée.

Il ne faut absolument pas recharger, ouvrir, chauffer ou brûler une pile usagée car elle pourrait exploser.

Marche/Arrêt

Marche/Arrêt :

Positionnez l'interrupteur O-T-M sur M pour le mettre en marche et sur O pour l'arrêter.

Utilisation de la bobine téléphonique :

Pour utiliser l'appareil en mode bobine téléphonique mettre l'interrupteur O-T-M sur la position T. Pour une utilisation optimale de la bobine téléphonique de l'appareil, le téléphone doit être muni d'une boucle magnétique. La bobine téléphonique peut aussi être utilisée dans les bâtiments publics qui disposent d'une boucle d'induction comme par exemple dans les écoles, les salles de concert ou les cinémas.

Mettez votre interrupteur O-T-M sur T, vous entendez directement, sans bruits gênants, le microphone étant coupé.

Contrôle de volume

Le contrôle de volume permet de moduler la quantité d'amplification délivrée par l'aide auditive. Pour augmenter le volume, il faut faire tourner le contrôle de volume en avant (fort) avec l'index. Pour le diminuer, tournez-le en arrière (faible).

Afin d'éviter un effet Larsen (ou sifflement), l'appareil réduit automatiquement sa force de sortie, par exemple quand vous enlevez les lunettes. Arrêtez l'appareil, mettez vos lunettes, tournez le réglage de volume sur (faible) et mettez en marche l'appareil.

Avant de mettre en marche les lunettes veuillez tourner le contrôle de volume sur «faible». Ne réglez le volume qu'après avoir mis en marche l'appareil et l'avoir écouté !

Il faut tout spécialement s'assurer que la surface de contact du vibreur soit fermement appuyée

contre la mastoïde. S'il est mis de façon partielle ou inclinée, un effet Larsen se produira.

Entretien journalier

Nettoyez régulièrement votre aide auditive avec un chiffon sec. Pour un nettoyage hygiénique et protecteur de votre peau, nous vous recommandons des produits spéciaux disponibles chez votre audioprothésiste ou dans les commerces spécialisés. N'utilisez jamais de solvant, d'huile ou de produit de nettoyage non recommandés par votre audioprothésiste pour nettoyer vos lunettes.

Précautions d'usage

- L'adaptation des lunettes n'est effectuée que par des audioprothésistes à partir de votre perte auditive. Il est important d'utiliser uniquement les réglages accessibles en se conformant aux instructions.

- Ces lunettes peuvent émettre un volume sonore très élevé. Afin d'éviter tout problème d'audition, l'adaptation doit impérativement être effectuée par un audioprothésiste.
- Une utilisation ou manipulation incorrecte des lunettes auditives peut causer le détachement de tout petits éléments de celles-ci. Si l'un de ces éléments entre dans votre oreille, consultez immédiatement un médecin.
- N'exposez jamais vos lunettes aux rayons du soleil (derrière le pare-brise d'une voiture), les mettre sur un radiateur ou dans une voiture pendant une nuit froide.
- Soyez conscient que les aides auditives ne fonctionnent plus correctement quand la pile est usagée. Cela peut être dangereux si vous vous trouvez dans la circulation, vous risquez de ne pas entendre certains bruits d'alarme.
- Si vous entendez un bourdonnement ou un sifflement, ce n'est pas nécessairement la faute

-
- de votre aide auditive. Le champ magnétique émis par un téléphone portable ou un autre instrument électronique peut en être la cause.
- Arrêtez votre aide auditive dans les mines et les environnements susceptibles d'être exposés à des explosions, à moins que l'appareil n'ait été spécialement certifié pour un tel usage.
 - Votre aide auditive en fonctionnement peut produire un sifflement qui risque d'attirer votre animal familier. Celui-ci peut alors la détériorer sans réparation possible. De même, il est préférable de la ranger dans un endroit où vous la trouverez facilement mais à l'abri des animaux familiers et des enfants.
 - Prenez l'habitude de retirer vos lunettes avant de prendre une douche, un bain, d'aller à la piscine ou de mettre de la laque sur vos cheveux.
 - Ne laissez pas vos lunettes dans la poche d'un vêtement qui va être lavé ou nettoyé.

- Consultez un médecin en cas d'irritations sur les oreilles ou la tête.
- Vos lunettes auditives et les accessoires appartiennent à des groupes de produits de la technologie moderne qui doivent être débarrassés conformément aux normes environnementales. Il est conseillé d'apporter les lunettes et les accessoires dans les lieux spécialement destinés aux traitements des déchets spéciaux. Votre audioprothésiste se fera un plaisir de vous aider dans cette tâche.

Service après-vente

Si, quelque soit la raison, vos lunettes tombent en panne, n'essayez pas de les réparer vous-même. Non seulement vous ne pourriez plus bénéficier des garanties et assurances mais surtout vous pourriez gravement les détériorer. Il est préférable de consulter votre audioprothésiste.

Un entretien et un contrôle réguliers auprès de votre audioprothésiste vous permettront d'éviter les pannes et par conséquent les réparations.

Si votre aide auditive tombe en panne ou si elle ne vous apporte pas satisfaction, consultez en premier lieu votre guide d'utilisation pour les solutions possibles. Si les problèmes persistent, n'hésitez pas à consulter votre audioprothésiste.

Informations réglementaires

Starkey déclare que les lunettes auditives sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 93/42/EEC. Certification de qualité selon les normes ISO 9001 : 2000/EN 13485 / 2003.

ATTENTION : tout changement, modification ou intervention non expressément approuvés par les parties responsables peut annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

En cas de problèmes

symptômes	causes possibles	solutions
l'aide auditive ne fonctionne pas	position de l'interrupteur ou du tiroir pile	Mettez la position M et fermez complètement le tiroir pile
l'aide auditive ne fonctionne pas	la pile est usagée ou mal insérée	changez la pile ou insérez-la correctement
l'aide auditive ne fonctionne pas	contrôle de volume	augmentez le volume
l'aide auditive siffle	mise en place	mettez les lunettes correctement
le son n'est pas assez fort	à quand remonte votre dernier examen audiométrique ?	consultez votre audioprothésiste
l'aide auditive fonctionne par intermittence	la pile est faible	remplacez la pile
manque de clarté, distorsion	les lunettes sont en panne	consultez votre audioprothésiste

Garantie

La garantie couvre tous les vices de fabrication constatés et reconnus par notre service technique. Elle donne droit au remplacement des pièces défectueuses. La garantie ne couvre pas les défauts de fonctionnement qui proviennent d'un mauvais entretien, d'un choc ou d'un démontage en dehors de nos services techniques. Sont exclus : les piles ainsi que les dégâts causés par celles-ci. Toute réparation effectuée en dehors de nos services techniques pendant la durée de la garantie et toute utilisation non prévue dans ce guide entraînent immédiatement la fin de la garantie.

L'acheteur bénéficie de la garantie des vices cachés conformément à l'article 1641 du Code Civil. Les aides auditives voyagent aux risques et périls de l'expéditeur.

Fabricant : Starkey Laboratories, Inc. 6700 Washington
Avenue South Eden Prairies Minnesota MN 55344 USA

Représentant Européen : Starkey Laboratories, Ltd. William
F. Austin House Bramhall Technology Park Hazel Grove
Stockport, Cheshire, United Kingdom SVK7 5BX

Distributeur : Starkey France 23 Rue Claude Nicolas Ledoux
Zone Europarc 94000 CRETEIL - FRANCE



N° DAQ 99215-563 Révision A le 03/02/06



CE
0086

